

# TUTORIEL APPLICATION

## LetMe Talk



1



## Présentation

« LetMe Talk est une application d'aide à la communication (CAA) qui prend en charge tous les domaines de la vie quotidienne pour redonner une voix à tous. Elle est gratuite. Son développement est financé par des dons. LetMe Talk permet de choisir des images - pictogrammes ou photos - qui, assemblées, constitueront une phrase, comme dans les techniques connues de CAA (Communication Améliorée et Alternative). »

## Editeur

AppNotize UG

## Disponible sur

iOs : <https://itunes.apple.com/fr/app/letmetalk-gratuit-caa-talker/id919990138?mt=8&ign-mpt=uo%3D4>

Android : <https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appnotize.letmetalk>



## Installation et configuration de l'application

Une fois l'application téléchargée, il faut lancer l'application une première fois pour la configurer.

La configuration correspond au téléchargement de pictogrammes (environ 9000 images/pictogrammes ARASAAC) et la constitution d'un profil, appelé profil « LetMeTalkPreconfiguration », constitué d'environ 200 mots répartis en 12 catégories prédéfinies (Général, Manger, Boissons, ...). Ce profil a été défini avec un enfant autiste.


Cette étape nécessite d'être connecté à internet.

Ensuite, pour utiliser l'application il ne sera plus nécessaire d'être connecté à internet

## Paramétrage de la langue – en français

L'application est par défaut paramétrée en anglais.

Cliquer sur la roue ( en bas à gauche), puis sur « settings » et ensuite sur « choose language » choisissez « Français French » et validez par « OK »

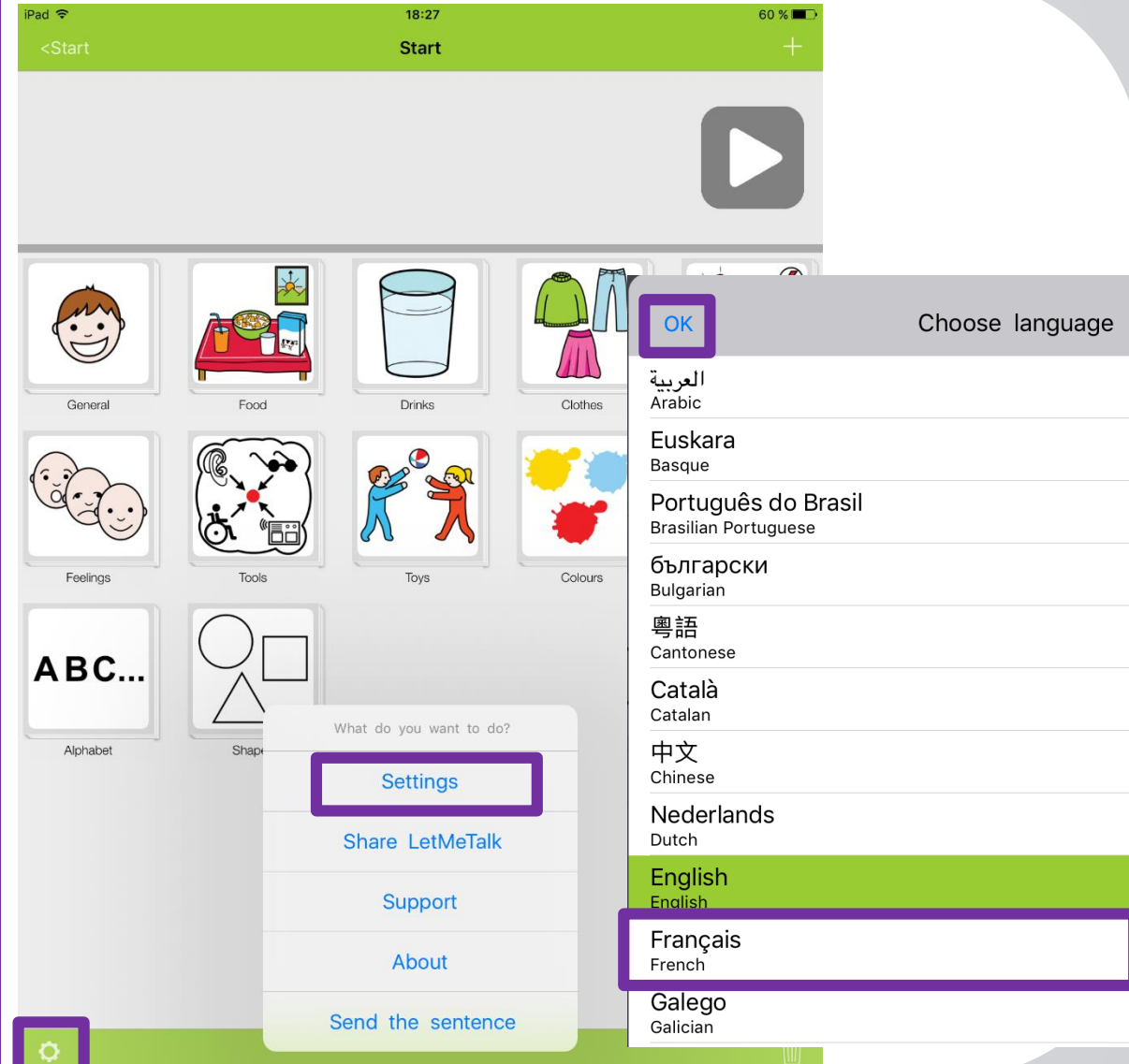

4




## LetMe Talk / Ecran principal

Permet de retourner à l'écran de choix précédent.  
« Début » est le nom de la catégorie de plus haut niveau

Barre de phrase

Touchez une **catégorie** pour l'ouvrir et découvrir les **mots** et **sous-catégories** qu'elle contient

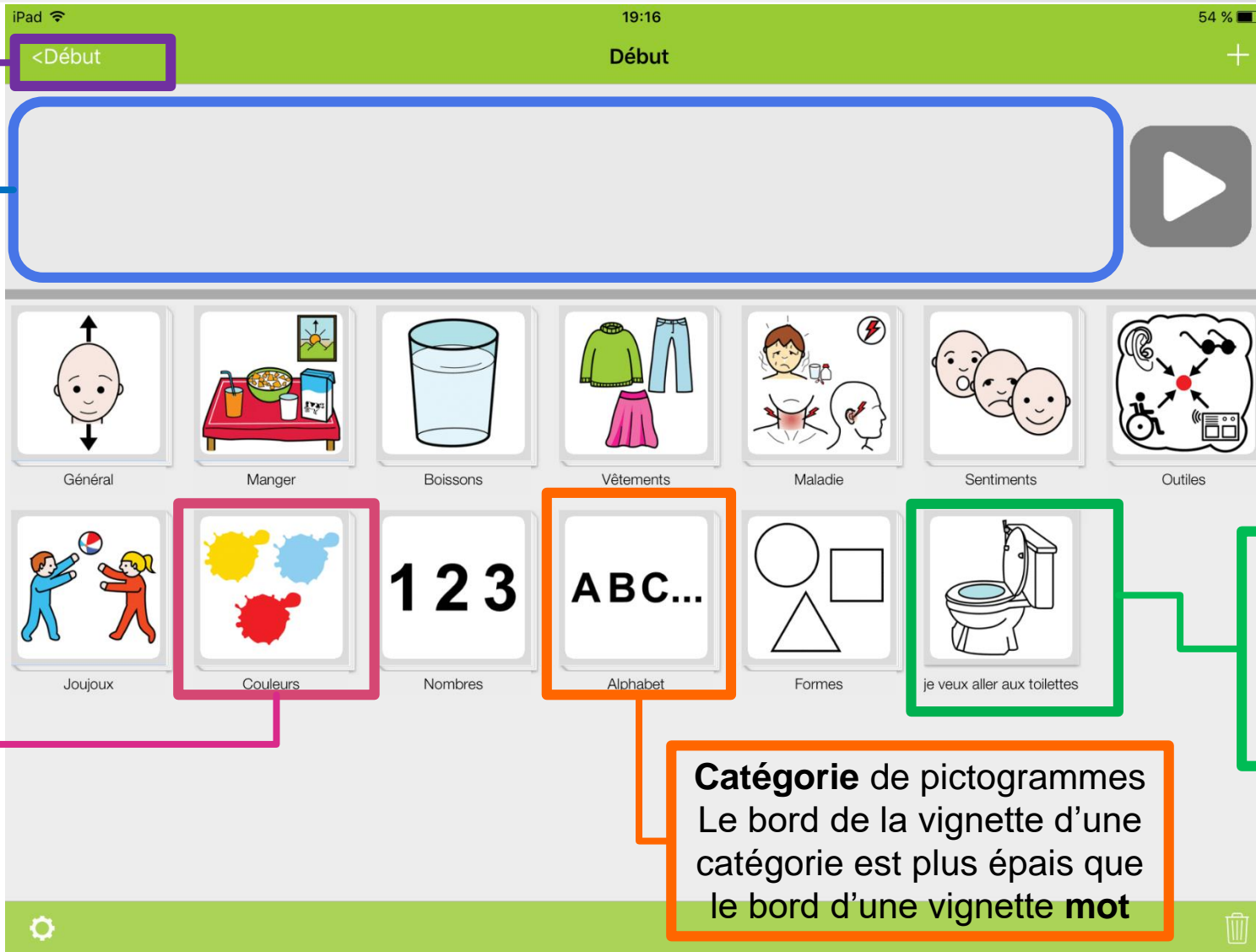

<Début

19:16

54 %

Début

+



Général




Manger



Boissons



Vêtements

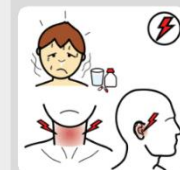

Maladie




Sentiments



Outils



Joujoux

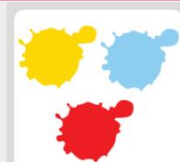


Couleurs

1 2 3


Nombres

A B C...


Alphabet

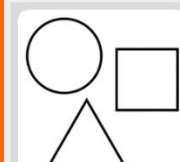

Formes

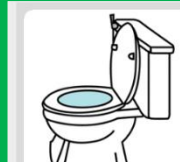

je veux aller aux toilettes

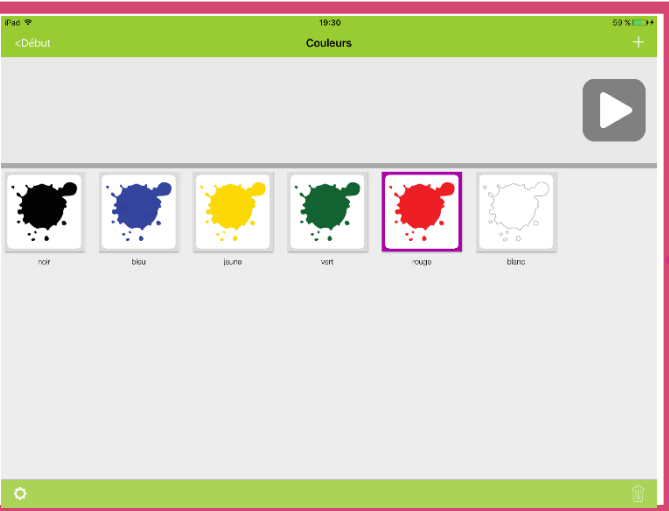

19:30

59 %

<Début

Couleurs

+

noir

bleu

jaune

vert

rouge

blanc

**Mot.**

Peut être une expression, voire une phrase

**Catégorie** de pictogrammes  
Le bord de la vignette d'une catégorie est plus épais que le bord d'une vignette **mot**

5



# LetMe Talk / Composer et prononcer une phrase

The screenshot shows the LetMe Talk app interface. At the top, there is a status bar with 'iPad', signal strength, '19:43', and '63%' battery. Below the status bar is a navigation bar with '<Début' on the left and 'Manger' in the center. The main area is a grid of icons representing various food items and actions. The 'Manger' category is highlighted in green. A phrase bar at the top right contains the word 'manger' and a play button icon. A trash can icon is located at the bottom right of the grid.

Nom la catégorie ouverte

Une voix artificielle prononce la phrase


Le mot en cours de prononciation apparait sur un fond vert, si le paramètre « Afficher les mots » est activé

Touchez la corbeille pour retirer le dernier mot de la barre de phrase

Touchez la vignette d'un mot pour l'ajouter à la phrase




## LetMe Talk / Ajouter un mot au profil

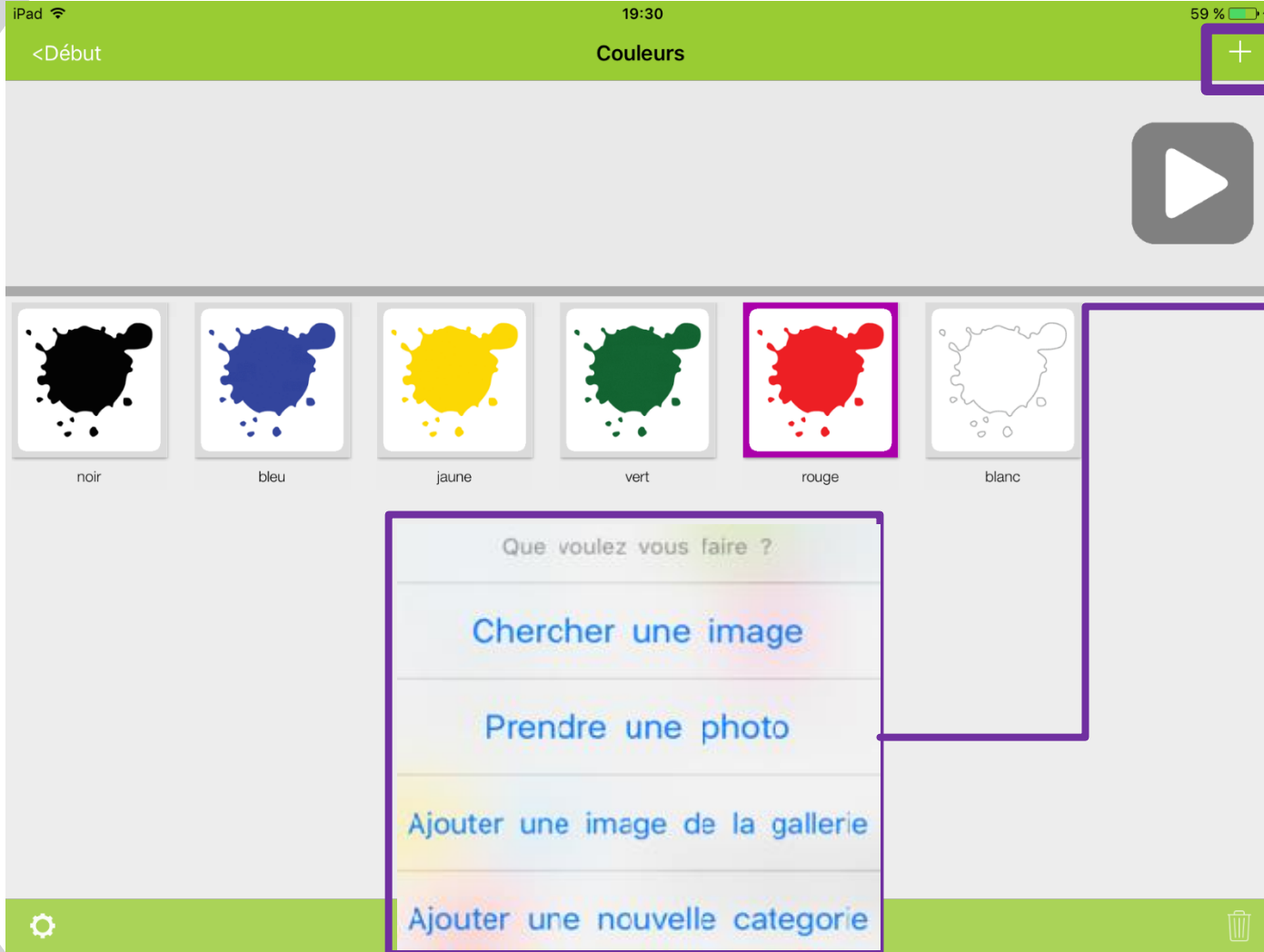


Cliquez sur «+» pour ajouter un mot

Il suffit, au choix, de :

- Chercher un pictogramme dans la base de l'application (« Chercher une image »)
  - Prendre une photo avec l'appareil photo de la tablette
  - Choisir une photo stockée sur la tablette (« Ajouter une image de la galerie »)
- et de lui attribuer un mot (une expression/une phrase) en la nommant.

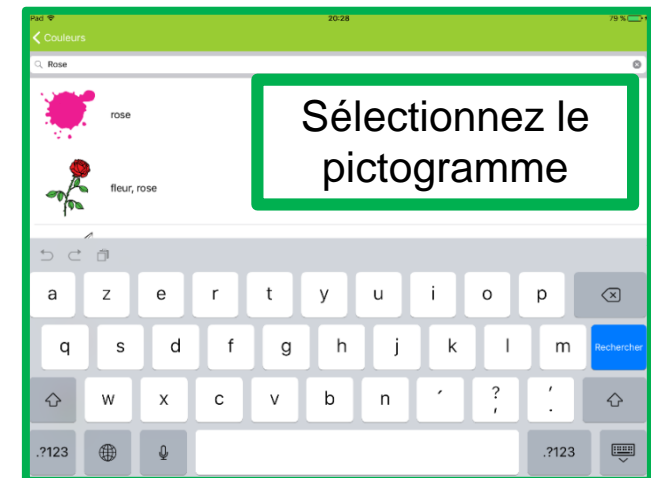



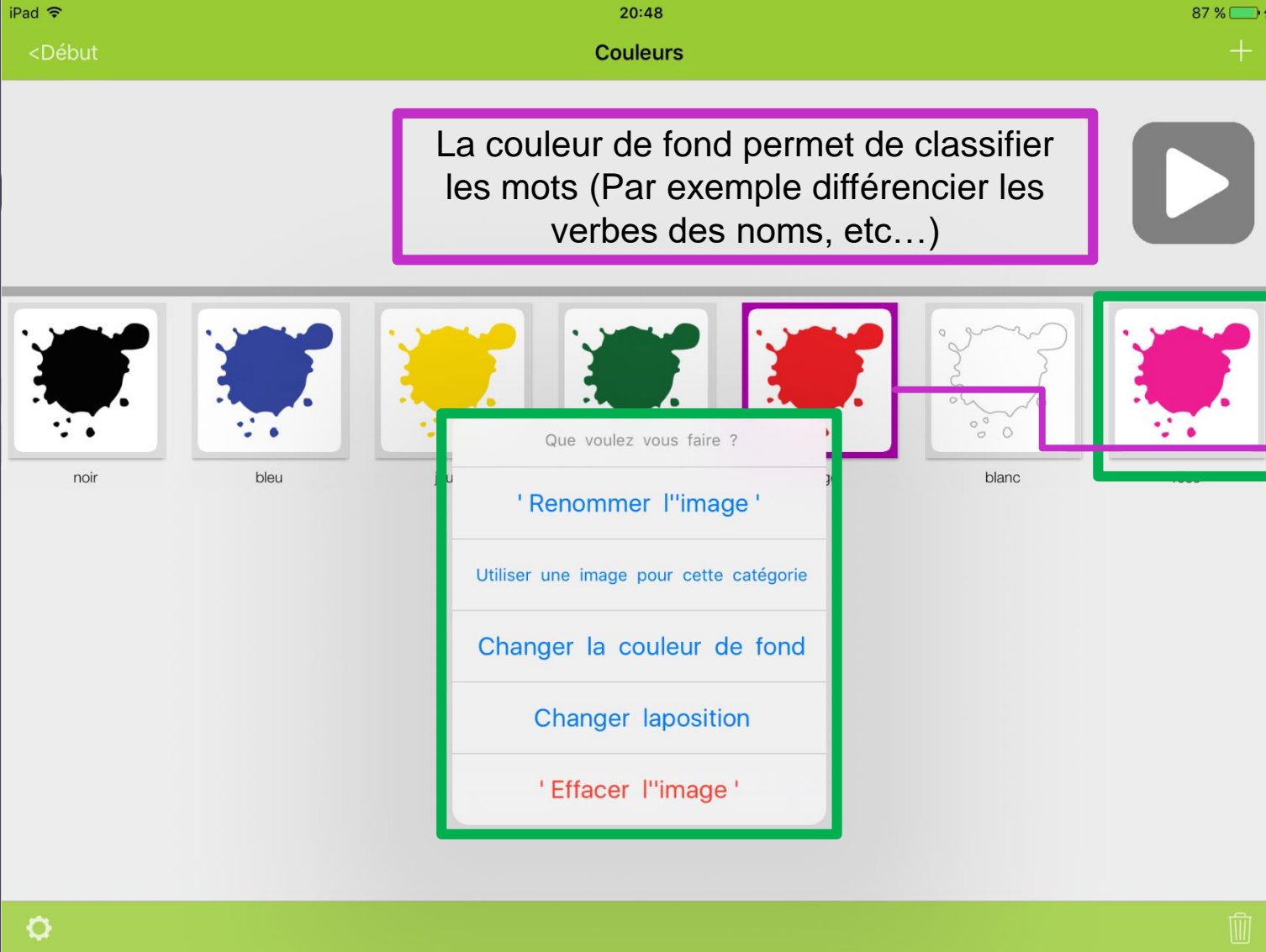

La couleur de fond permet de classer les mots (Par exemple différencier les verbes des noms, etc...)

Appuyer quelques secondes sur une vignette fait apparaître une fenêtre


On peut alors :

- Renommer le mot (« Renommer l'image »)
- Changer la couleur de fond
- Changer la position du mot dans la catégorie
- Supprimer le mot (« Effacer l'image »)

On ne peut pas déplacer un mot dans une autre catégorie. Il faut recréer le mot dans cette autre catégorie. On peut créer un même mot dans plusieurs catégories



## LetMe Talk / Ajouter une catégorie

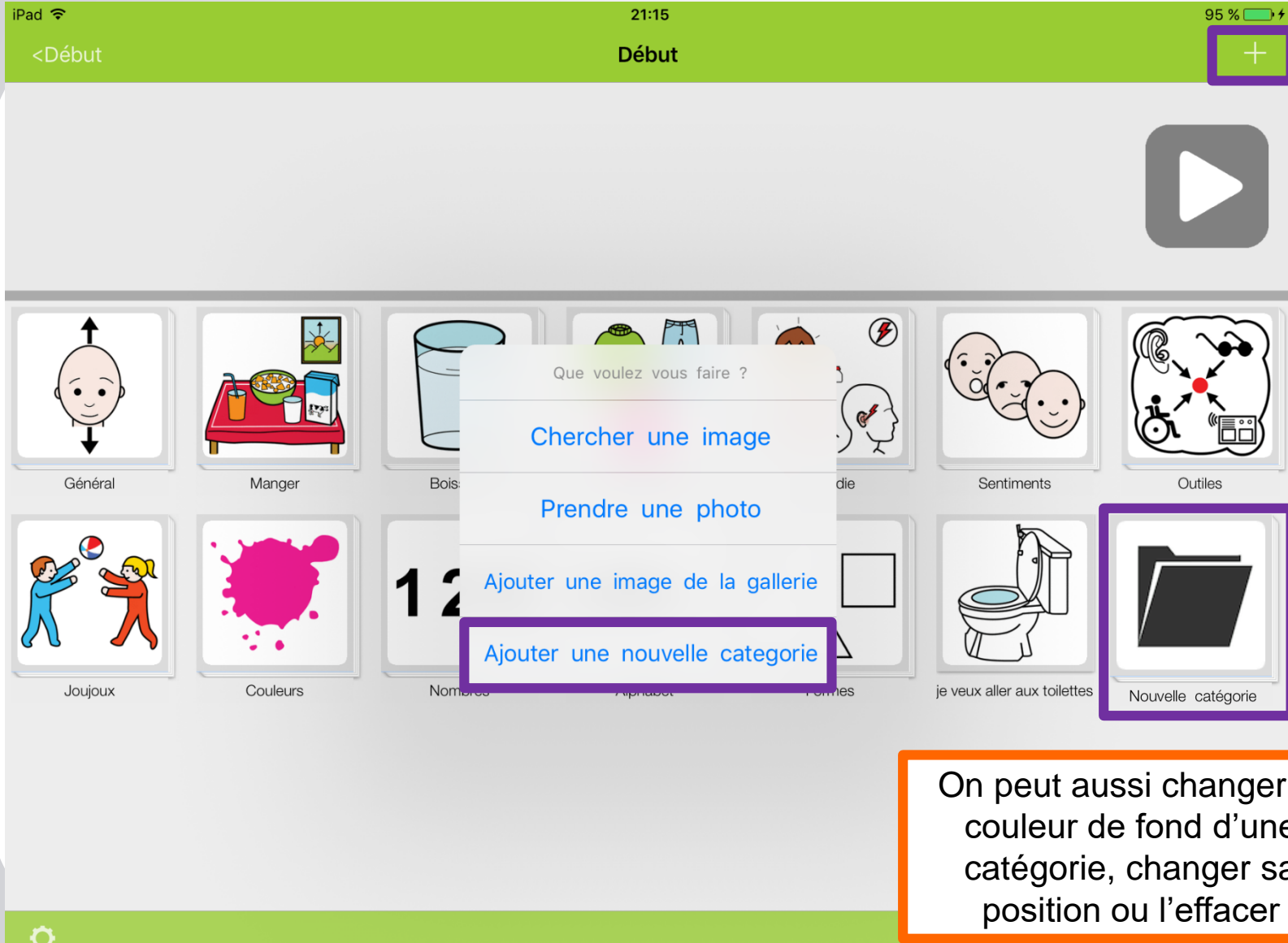


Cliquer sur «+», puis sur « Ajouter une nouvelle catégorie ».  
Une nouvelle catégorie est créée.

Toucher cette nouvelle catégorie quelques secondes fait apparaître une fenêtre de personnalisation.  
Sélectionner « Renommer la catégorie » et saisir le nom de cette catégorie




On peut aussi changer la couleur de fond d'une catégorie, changer sa position ou l'effacer

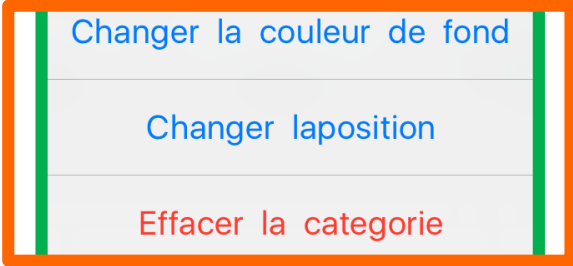





Certains paramètres ne sont pas traduits en français.

OK	Paramètres		
	<b>Paramètres de langues</b>	Paramètres de langues	Paramètres de langues
	Choisir la langue >	Choisir la langue	Choix de la langue - modifie les noms des mots, des catégories et les menus ainsi que la prononciation
	Changer la langue English >	Changer la langue English	pour revenir au choix de langue précédent
	Activer la voix 	Activer la voix	Il faut activer la voix pour que l'application prononce la phrase et les noms des mots et des catégories (en fonction des préférences)
	<b>Sauvegarde de profils</b>	Sauvegarde de profils	Gestion des profils - un profil correspond à une liste de catégories et de mots
	Charger un profil >	Charger un profil	charger un profil
	Sauvegarder le profil >	Sauvegarder le profil	sauvegarder un profil - on lui donne alors un nom de profil
	Partager le profil >	Partager le profil	

OK Paramètres		Préférences	Préférences
Préférences		Préférences	Préférences
Activer les modifications	<input checked="" type="checkbox"/>	Activer les modifications	Permet de créer et modifier des vignettes mots et catégories
Afficher les mots	<input checked="" type="checkbox"/>	Afficher les mots	Affiche les mots qui correspondent aux mots et aux catégories (sous la vignette du mot ou de la catégorie)
Prononcer le nom des catégories	<input type="checkbox"/>	Prononcer le nom des catégories	Retour au début de catégorie après le choix d'un mot
Effacer la phrase	<input type="checkbox"/>	Effacer la phrase	Efface la phrase dans la barre de phrase une fois prononcée
Go back to Start category after selecting word	<input type="checkbox"/>	Go back to Start category after selecting word	Retour automatique au début de catégorie après le choix d'un mot
Show words in Sentencebar	<input checked="" type="checkbox"/>	Show word in Sentencebar	Pour afficher le mot correspondant à la vignette sélectionnée dans la barre de phrase
Change speech rate	>	Change speech rate	Pour modifier la vitesse d'élocution
Enable age filter	<input type="checkbox"/>	Enable age filter	
Enable Password	<input type="checkbox"/>	Enable Password	Active la saisie d'un mot de passe pour changer les paramètres
' Taille d'image '		'Taille d'image'	Taille des vignettes (mots et catégories)
' Taille d'image en catégorie '	>	'Taille d'image en catégorie '	Taille des vignettes mots et catégories - sous la barre de phrase
' Taille de l'image dans la barre de phrase '	>	'Taille de l'image dans la barre de phrase '	Taille des vignettes mots dans la barre de phrase
' Taille de l'image dans les résultats de recherche '	>	'Taille de l'image dans les résultats de recherche '	Taille des vignettes mots et catégories dans les résultats de recherche

**Pour empêcher l'utilisateur de modifier les paramètres et le profil choisi, il suffit d'activer le paramètre « Enable password » et de ne pas activer le paramètre « Activer les modifications ».**



Il est possible de transférer un profil LetMeTalk d'un iPad sur un autre iPad via iTunes.

Il faut donc avoir un PC ou un Mac avec le logiciel iTunes.

Brancher la tablette sur le Mac (ou le PC) qui contient iTunes via le cordon. iTunes va se lancer tout seul.

Sélectionner l'appareil (en haut à gauche de l'écran).

Sélectionner Apps (sur la gauche de l'écran).

Descendre dans la fenêtre à droite pour voir la partie

**Partage de fichiers** et sélectionner l'application concernée (ex LetMeTalk)

On voit alors apparaître la liste des fichiers de cette

application (cf capture d'écran ci-jointe). Un fichier profil se nomme «nom profil.lmtbackup».

Copier le fichier que l'on veut récupérer sur le Mac (par glisser-déposer).

On pourra alors connecter une autre tablette sur iTunes et copier le fichier du Mac vers cette autre tablette.

